

PAROSIN

ZESTAW DO PŁUKANIA KIESZONEK DZIAŚŁOWYCH

Preparat w postaci płynu ze strzykawkowym dozownikiem do płukania, przemywania i oczyszczania kieszonek dziąsłowych.

SPOSÓB UŻYCIA

Zdjąć zatyczkę i w jej miejsce założyć zagiętą końcówkę. Wprowadzić ostrożnie końcówkę możliwie jak najgłębiej do kieszonki dziąsłowej. Powoli naciskając tłoczek przemyć miejsce zapalne. Płukać aż do momentu, gdy wszystkie stałe zanieczyszczenia wypłyną z kieszonki. Po zakończonym przemywaniu polecić pacjentowi przepłukanie ust wodą.

Dla zmniejszenia dolegliwości bólowych podczas płukania, lekko podgrzać preparat przed użyciem umieszczając go np. w ciepłej wodzie.

ZASTOSOWANIE

- kieszonki dziąsłowe
- okolice wypełnień klasy II
- okolice zębów z utrudnionym wyrzynaniem, zwłaszcza ósemek
- po usuwaniu kamienia nazębnego
- obrzęki dziąseł pod protezami i w okolicy zębów podtrzymujących klamry
- pod pracami protetycznymi typu mosty lub korony
- przed ekstrakcją, w kieszonkach dziąsłowych sąsiadujących z zębem przeznaczonym do usunięcia
- w okolicy aparatów ortodontycznych

PRZECIWWSKAZANIA

Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.



ARKONA

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Nie występują w przypadku postępowania zgodnie ze wskazaniami.

INFORMACJE DODATKOWE

Preparat dla lekarzy stomatologów i higienistek stomatologicznych. Preparatu Parosin nie należy stosować do płukania kanałów korzeniowych. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci oraz osób niepowołanych.

Preparat może być stosowany w chorobie wrzodowej, cukrzycy oraz u kobiet w ciąży. Nie powoduje uzależnień ani powikłań. Może być stosowany według indywidualnych potrzeb.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Unikać kontaktu z oczami. W razie kontaktu, przepłukać dużą ilością wody i poradzić się specjalisty.


GWARANCJA

Firma ARKONA wymienia produkty, które posiadają stwierdzone wady lub zwraca koszty zakupu. ARKONA nie odpowiada za straty lub szkody spowodowane nieprawidłowym lub niezgodnym z instrukcją użyciem preparatu.

SKŁAD

1. Woda ozonowana
2. Nanokoloid srebra
3. Azotan so
4. Aromaty
5. Kwas ortofosforowy
6. Kwas mlekowy


1. Zapalenie kieszonek dziąsłowych

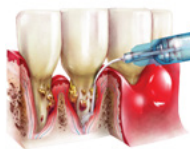

2. Okolice zębów z utrudnionym wyrzynaniem (zwłaszcza ósemek)



3. Pod pracami protetycznymi typu mosty lub korony

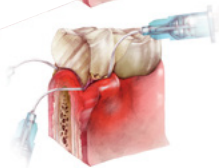

4. Okolice wypełnień klasy II



ARKONA

Laboratorium Farmakologii Stomatologicznej
Nasutów 99 C, 21-025 Niemce, EU
www.arkonadent.com



Data ostatniej aktualizacji ulotki: 22.05.2018 r.